

Datenblatt Sekretauffangglas

Funktionsbeschreibung

Sekretauffangglas Das abgesaugte Sekret wird im Sekretauffangglas gesammelt. Als Überlaufsicherung im Sekretauffangglas dient ein Schwimmerkörper, der beim Überschreiten der maximalen Füllhöhe die Leitung zum Druckluftinjektor / Vakuumregler verschließt.
Die Skalierung auf allen Sekretauffanggläsern dient nur als Richtwert und hat keine Messfunktion

Reinigung und Pflege

Zerlegen

Zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation Auffangglas abschrauben / entnehmen und entleeren.

Desinfektion und Reinigung

Eine der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen ist vor der ersten Anwendung sowie immer dann, wenn aus klinisch, hygienischer Sicht erforderlich, durchzuführen. Zur Reinigung und Desinfektion dürfen nur mittel verwendet werden, welche die eingesetzten Kunststoffe (Polysulfon und Silikon) und Metalle (Edelstahl, Aluminium, Messing Oberflächen veredelt) nicht angreifen.

Desinfektion

Teile, die mit der Atemluft des Patienten in Berührung kommen, sind in jedem Fall zu desinfizieren und zu reinigen.

Bei teilen, die nicht mit der Atemluft des Patienten in Berührung kommen, ist im Allgemeinen eine Wischdesinfektion ausreichend.

Soweit wie möglich sollten Kaltsterilisationsverfahren angewendet werden.

Autoklavieren

Alle Teile sind bis 121°C autoklavierbar.

Vor dem Autoklavieren sollte darauf geachtet werden, daß die Ventile geschlossen werden, um zu verhindern, daß Feuchtigkeit in die Durchfluß-Anzeige gelangt. Der Schlauch muß vorher abgeschraubt werden.

Datenblatt Sekretauffangglas



Sekretauffangglas Schiene mit
Bajonettverschluss

Größe 1,0 l	6231050
Größe 2,0 l	6231000
Größe 3,0 l	6231060



Ersatzglas 1,0 l 5533800



Ersatzglas 2,0 l 5533815
Ersatzglas 3,0 l 5533820

Datenblatt Sekretauffangglas



Sekretauffangglas 1,0 l
Direkt 6600250



Sekretauffangglas 1,0 l
Schiene 6600255




Sekretauffangglas 1,0 l
Tragegestell 6600265



Sekretauffangglas kpl. 0,3ltr
(Sicherheitsvorlage) 660-0275



Ersatzglas 1,0 l
mit Gewinde 6600251

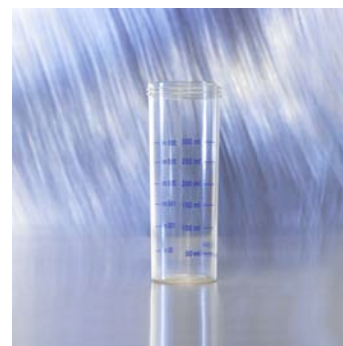

Ersatzglas 0,3 l
mit Gewinde 6600276


Datenblatt Sekretauffangglas

Ersatzteile



- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1) Dichtung für Sekretglas 623-... | 024-2480 |
| 2) Schienenhalterung | 057-0131 |
| 3) Oberteil Sekretauffangglas | 057-0130 |

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------|
| ohne Abb. | |
| Dichtset für Sekretglas
mit den Artikel Nr.: 623... | 623-1070 |

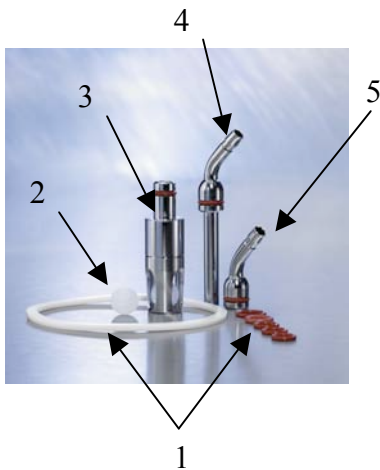

- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1) Dichtset für Sekretglas mit
den Artikel Nr.: 660... | 660-0253 |
| 2) Schwimmer für Überlauf | 660-0254 |
| 3) Sekret-Überlaufvorrichtung | 660-0252 |
| 4) Winkelschlauchstutzen lang „Pat“ | 043-3005 |
| 5) Winkelschlauchstutzen kurz „Vac“ | 043-3006 |

Ausführlichere Informationen über unsere Produkte finden Sie unter www.heyer-aerotech.de .

Hier finden Sie auch die kpl. Gebrauchsanweisung als Download.

Oder sprechen Sie uns direkt an.

Sie erreichen uns unter Tel. 02603 / 50707-0 / Fax 02603 / 50707-67 / E-Mail office@hey-aerotech.de .